

LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION  
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE


**UTILISATION PREVUE:**

La matrice Matrix MTA+ sert à formuler une dose applicable du matériau préparé MTA+ avant de l'appliquer dans la dent ou le canal à traiter.

**MODE D'EMPLOI:**

Préparer le matériau MTA+ conformément à la notice d'utilisation fournie par le fabricant avec le produit MTA+. Sur chaque paroi de la matrice Matrix MTA+ il y a des creux au diamètre donné décrit entre 0,7 mm et 1,0 mm. Le matériau préparé doit être placé sur la paroi de la matrice de manière à remplir les creux choisis. En utilisant un instrument stérile, prélever le matériau formé de la matrice.



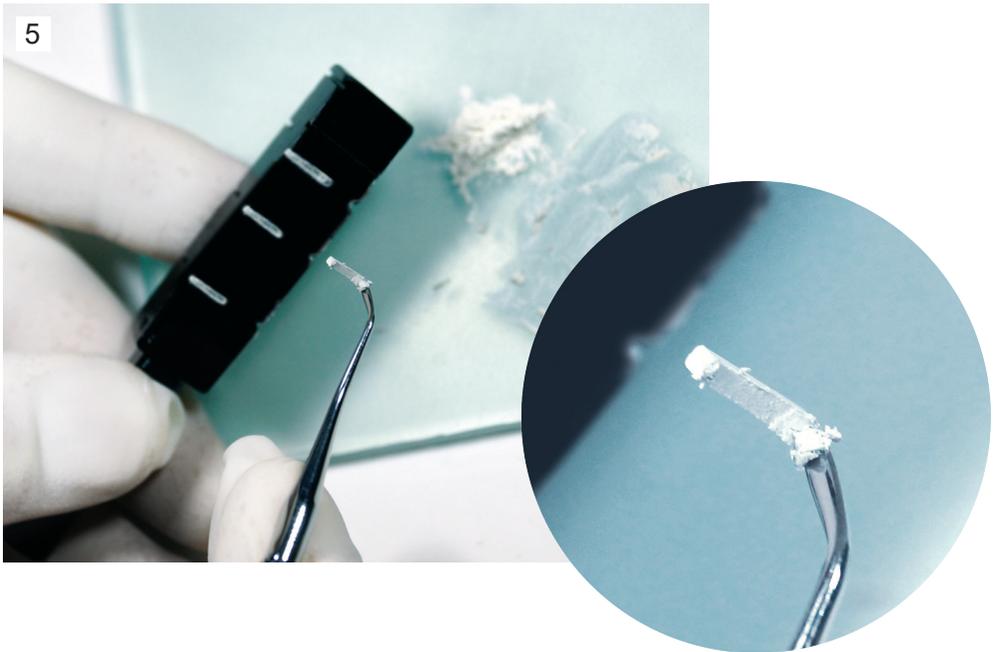

**CONTRE-INDICATIONS:**

Ne pas laisser la matériau dans la matrice. Le matériau préparé doit être utilisé dans les 10 minutes qui suivent la préparation.

**MESURES DE PRECAUTION:**

Tenir compte des avertissements de la notice d'utilisation du produit MTA+.

**CONSERVATION:**

Tenir hors de portée des enfants.

**UTILISATION DU PRODUIT:**

Avant utilisation : frotter avec de l'alcool isopropylique ou éthylique.

Après utilisation : Eliminer les résidus du matériau MTA+ à l'aide d'une brosse et de l'eau avec du détergent. Frotter la matrice lavée MATRIX avec de l'alcool isopropylique ou éthylique.

La stérilisation du produit à 121°C au cycle de la vapeur ne provoque pas de changement de ses propriétés physiques (forme, dimensions).



VOIR LA NOTICE D'UTILISATION



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Pologne  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tél/fax 00 48 15 842 35 85