

Filo retrattore a maglie impregnato di cloruro di alluminio esaidrato.
Utilizzato nella retrazione dei tessuti gengivali intorno al dente per migliorare i risultati delle impronte dentali e l'emostasi del margine gengivale.

COMPOSIZIONE: Filo concatenato in poliestere/poliammide.
Impregnato con cloruro di alluminio esaidrato 0,50mg \pm 0,10mg/pollice.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Tagliare il filo impregnato della lunghezza richiesta usando l'estremità sul cappuccio.
- Applicare il filo saldamente alla cervice del dente e premere con attenzione nel solco utilizzando un posizionatore per filo retrattore.
- Lasciare il filo 5 minuti nel solco.
- Rimuovere il filo appena prima di prendere l'impronta.

CONTENUTO:

- Dispenser con 254 cm (100 pollici).

CONSERVAZIONE:

- Dopo l'uso, chiudere il cappuccio e conservare in un luogo asciutto.

PRECAUZIONI:

- Solo per uso dentistico.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare in pazienti con una storia di allergie al cloruro di alluminio esaidrato.
- Irrita la pelle e gli occhi.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842 35 85