

Fluor Defender



Desensitizér s fluorem pro děti

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: 0,1% fluorsilan (1 600 ppm F), HEMA, pomocné látky.

URČENÍ

- Posílení odolnosti skloviny

- Prevence zubního kazu

Díky obsahu fluoru působí remineralizačně na sklovinu. Vytváří na povrchu ochranný film.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Očistěte povrch zubů

2. Vysušte pomocí proudu vzduchu a válečků z ligninu.

3. Ohraničte pracovní oblast pomocí kofferdamu.

4. Přípravek před použitím protřepejte. Otevřete lahvičku a nakapejte do předem připravené nádoby cca 3 kapky přípravku.

5. Přiloženým štětečkem naneste rovnoměrně tenkou vrstvu.

6. U úzkých mezizubních prostor použijte dentální nit.

7. Vysušte mírným proudem vzduchu minimálně po dobu 30 sekund.

8. Odstraňte kofferdam.

9. Po zákroku nejezte a nevyplachujte ústní dutinu minimálně po dobu 45 minut.

Lakování lze opakovat jednou za 6 měsíců a v případě zvýšeného rizika vzniku zubního kazu maximálně jednou za 3 měsíce.

Lahvička výrobku je určena pro 2–3 pacienty s kompletním chrupem, štěteček slouží k jednorázovému použití.

Při opakovaném použití štětečku hrozí riziko sekundární kontaminace. Je zakázáno namáčet štětečku přímo v lahvičce. Lak nevyžaduje vytvrzování světlem.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u dětí před ukončeným 3 rokem života.

Nepoužívejte přípravek u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku. Nepoužívejte, pokud u pacienta probíhá závažný stav.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Používejte výhradně po vyléčení zánětlivého stavu.

Při práci s přípravkem používejte kofferdam, rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. Přípravek může dráždit sliznice, kůži a oči. Může vyvolávat alergii. V případě kontaktu s kůží okamžitě opláchněte vodou. Po požití velkého množství může působit škodlivě. V případě požití nevyvolávejte zvracení, vypijte vodu, pokud se objeví jakékoliv obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění: hořlavina. Obsahuje ethylacetát. Skladujte mimo dosah zdrojů ohně.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte proti slunečnímu záření. Po použití těsně uzavřete. Skladujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Upozornění! Výrobek si po otevření uchovává své vlastnosti po dobu 6 měsíců.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

DOSTUPNÉ OBALY

Lahvička obsahuje 1 ml přípravku, jednorázové štětečky.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85