

Fluidní zubní leptadlo

PŘED POUŽITÍM SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM
VÝROBEK JE URČEN VÝHRADNĚ K POUŽITÍ LÉKÁŘEM STOMATOLOGEM

SLOŽENÍ: kyselina o-fosforečná 36 %, gelová báze, barvivo.

URČENÍ

Leptadlo BLUE ETCH FLOW se používá k naleptání skloviny a zuboviny před použitím kompozitních materiálů, laků na brázdý a štěrbin. S ohledem na vhodně zvolenou polotekutou konzistenci BLUE ETCH FLOW proniká do špatně dostupných brázd a štěrbin. Hodí se také k použití před cementováním kořenových výplní zasahujících do korunkové části zubu ze sklolaminátu.

PŘÍPRAVA VÝROBKU K POUŽITÍ (pro variantu 10 ml a 50 ml)

1. Odšroubujte bílou zátku z velké stříkačky obsahující leptadlo.
2. Na místo bílé zátky našroubujte spojku.
3. Odšroubujte modrou zátku na spojce a následně na její místo našroubujte dávkovač - přiloženou menší stříkačku.
4. Zmáčkněte píst velké stříkačky a přetlačte potřebné množství gelu do dávkovače, maximálně 2 ml.
5. Odšroubujte naplněný dávkovač a našroubujte na jeho konec aplikátor (přiloženou tupou jehlu). Výrodek je připraven k použití.
6. Spojku nechte připevněnou na velkém balení a zajistěte ho modrou zátkou.

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ

Před přistoupením k zákroku ponořte přiložený aplikátor do lihu (ethylalkoholu) a následně ho umístěte na stříkačku. Na osušený povrch naneste tenkou vrstvu leptadla. Leptejte maximálně 60 sekund. Opláchněte silným vzducho-vodním proudem (asi 15-20 sekund). Nepřesušujte. V případě znečištění skloviny proces zopakujte. Výrodek je určený k opakovanému použití, aplikátor je jednorázový. Opakované použití aplikátoru může vytvářet riziko sekundární infekce.

KONTRAINDIKACE

Výrodek nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dráždí sliznici ústní dutiny, kůže a oči. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékaře. Během práce s výrobkem používejte koferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě pod 25° C. Skladujte mimo dosah dětí. Termín použitelnosti se nachází na přímém obalu. Po otevření se doba použitelnosti nemění pod podmínkou těsného uzavření po každém použití.

NAKLÁDÁNÍ S OBALEM OD VÝROBKU

Použitý obal předejte k likvidaci nebo vraťte výrobci.

DOSTUPNÁ BALENÍ

Stříkačka obsahující 2 ml přípravku, jednorázový aplikátor. Stříkačka obsahující 10 ml nebo 50 ml přípravku, jednorázové aplikátory, spojka, dávkovač.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85