

CHLORAXID 2% EXTRA

CE 2409

Přípravek k vyplachování kořenových kanálků

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: chlornan sodný (obsah aktivního chloru 2 %), čištěná voda, povrchově aktivní látky.

URČENÍ

Během mechanického rozšiřování kanálku odstraňuje zbytky odumřelé dřevě.

Čistí kanálek, včetně odstranění sprašné vrstvy, aby před vyplněním kořenového kanálku došlo k odhalení vyústění zubovinových kanálků.

Předchází změně barvy zubů, k níž by mohlo dojít po vyplnění nevypláchnutého kanálku.

Adaptér se šroubovacím uzávěrem k odběru přípravku do stříkačky.

1. Odšroubujte šroubovací uzávěr lahvičky.

2. Našroubujte adaptér na lahvičku.

3. Před použitím odstraňte modrý šroubovací uzávěr, našroubujte konec stříkačky na otvor adaptéru, překlopte lahvičku s přípravkem dnem vzhůru a za současného přidržování adaptéru natáhněte tekutinu do stříkačky.

4. Po každém použití uzavřete adaptér modrým šroubovacím uzávěrem.

5. V případě přepravy odejměte adaptér a zašroubujte lahvičku šroubovacím uzávěrem.

5. V případě přepravy odejměte adaptér a zašroubujte lahvičku šroubovacím uzávěrem.

ZPŮSOB POUŽITÍ

CHLORAXID 2% EXTRA aplikujte do kanálku stříkačkou s jehlou s bočním otvorem. Kanálky vydatně vypláchněte, v množství 10 ml tekutiny na 1 kanálek. Chlornan sodný, který je součástí výrobku, se okamžitě v kontaktu s organickou látkou deaktivuje. Zároveň se snížením koncentrace chlornanu sodného musíte prodloužit dobu vyplachování a zvýšit objem použitého roztoku.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

UPOZORNĚNÍ! Během vyplachování kořenových kanálků, konkrétně mezi vyplachováním chlornanem sodným a chlorhexidinem dihydrochloridem, použijte fyziologický roztok, který zabraňuje srážení hnědě usazeniny. Vydatně proplachujte.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Během proplachování kořenového kanálku nepoužívejte příliš silný proud tekutiny, protože tím může dojít k poškození tkání v okolí hrotu, které se projeví bolestí a otokem měkkých tkání. Dbejte maximální opatrnosti během používání u perforací. Dráždí sliznice ústní dutiny, oči a kůži. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce musíte používat kofferdam. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky (brýle, ochranná maska, rukavice).

DÁVKOVAČ NESLOUŽÍ KE SKLADOVÁNÍ TEKUTINY!

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě 2–8 °C (v ledničce). Chraňte proti působení slunečního záření.

Skladujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je uvedena na obalu. Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

PŘEVOZ


Výrobce povoluje přepravu výrobku po dobu delší než 10 dnů při teplotě do 40 °C. Krátkodobý převoz v uvedeném rozpětí teplot nemá vliv na bezpečnost a účinnost působení výrobku po celou dobu jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL

Láhev s obsahem 200 g nebo 400 g přípravku, adaptér se šroubovacím uzávěrem, dávkovač.

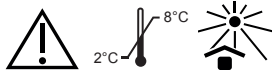

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85

Datum poslední aktualizace: 30.08.2017/1