

Fil rétracteur tricoté imprégné de chlorure d'aluminium hexahydraté.
Utilisé pour la rétraction des tissus gingivaux autour de la dent pour améliorer les résultats des empreintes dentaires et de l'hémostase du rebord gingival.

COMPOSITION : Fil conjugué polyester/polyamide
Imprégné de chlorure d'aluminium hexahydraté 0,50 mg \pm 0,10 mg/pouce.

MODE D'EMPLOI :

- Couper le fil imprégné à la longueur requise en utilisant le bord placé sur le capuchon.
- Appliquer le cordon étroitement sur le collet de la dent et appuyez doucement dans le sillon à l'aide d'un fouloir pour fil rétracteur.
- Laisser le fil dans les 5 minutes dans le sillon.
- Retirer le fil directement avant de prendre l'empreinte.

CONTENU :

- Distributeur avec 254 cm de fil (100 pouces).

CONSERVATION :

- Fermer le capuchon après utilisation et conserver dans un endroit sec.

PRÉCAUTIONS :

- Pour usage dentaire uniquement.
- Garder hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser chez les patients ayant des antécédents d'allergie au chlorure d'aluminium hexahydraté.
- Irritant pour la peau et les yeux.
- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842 35 85