

CHLORAXID 2% GEL EXTRA

CE 2409

Přípravek k vyplachování kořenových kanálků

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: chlornan sodný (obsah aktivního chloru 2%), čistěná voda, povrchově aktivní látky, gelová báze.

URČENÍ

Během mechanického rozšiřování kanálku odstraňuje zbytky odumřelé dřevě. Čistí kanálek, včetně odstranění správné vrstvy, aby před vyplněním kořenového kanálku došlo k odhalení vyústění zubovinových kanálků. Předchází změně barvy zubů, k níž by mohlo dojít po vyplnění nevypláchnutého kanálku. Gelová konzistence přípravku minimalizuje riziko protlačení přípravku hrotovým otvorem a zajišťuje velmi dobré zpracování během aplikace.

CHLORAXID 2% GEL EXTRA doporučujeme zejména k opracování kanálků s širokými, nepravidelnými nebo poškozenými hroty.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příložený aplikátor musíte před zahájením zákroku ponořit do lihu (etanolu), a následně nasadit na stříkačku. Přípravek CHLORAXID 2% GEL EXTRA musíte při opracování kořenového kanálku nanést přímo do něj příloženým aplikátorem nebo nanést přípravek na požadovaný nástroj. Opracujte kanálek, vypláchněte fyziologickým roztokem pomocí jehly s bočním otvorem. Proplachujte střídavě s EDTA. Postup několikrát opakujte. Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

UPOZORNĚNÍ! Během vyplachování kořenových kanálků, konkrétně mezi vyplachování chlornanem sodným a chlorhexidinem dihydrochloridem, používejte fyziologický roztok, který zabráňuje srážení hnědé usazeniny. Vydatně proplachujte.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Dbejte maximální opatrnosti během používání u perforací. Může dráždit sliznice ústní dutiny, oči a kůži. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce s přípravkem používejte koferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle, ochranný oděv.

SKLADOVÁNÍ

Składujte v originálním obalu při teplotě 2–8 °C (v ledničce). Chraňte proti působení slunečního záření. Składujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je uvedena přímo na obalu. Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

PŘEVOZ


Výrobce povoluje přepravu výrobku po dobu delší než 10 dnů při teplotě do 40 °C. Krátkodobý převoz v uvedeném rozpětí teplot nemá vliv na bezpečnost a účinnost působení výrobku po celou dobu jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

DOSTUPNÁ BALENÍ

Stříkačka s obsahem 2 ml přípravku, sada jednorázových aplikátorů.

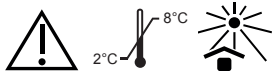

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85

Datum poslední aktualizace: 30.08.2017/1